

# Anwenderformular für flexible Endoskope - interne und externe Kunden -



Leihgerät     aus der Reparatur     ohne Anwendung

Endoskoptyp: \_\_\_\_\_  
(z.B. flex. Bronchoskop)

Individual Nr.: \_\_\_\_\_  
(z.B. UFD-182)

Hersteller: \_\_\_\_\_  
(z.B. Olympus)

Typ Nr. : \_\_\_\_\_  
(z.B. 7305.001)

Abteilung: \_\_\_\_\_  
(z.B. Station 23)

Sieb Nr.: \_\_\_\_\_

Serien Nr.: \_\_\_\_\_

## Instrumente mit besonders hohen Anforderungen an die Aufbereitung

Entsprechend der Herstellerangaben muss eine Aufbereitung unmittelbar nach der Anwendung/ dem Eingriff erfolgen. Kann dies nicht gewährleistet werden, muss der Anwender die erforderlichen Maßnahmen durchführen, um das Antrocknen von Verunreinigungen zu verhindern.

Entscheidend ist die manuelle Bürstenreinigung mit der vom Hersteller dafür vorgegebenen Reinigungsbürste.

### 1. Schritt:

Den Einführungsteil des Endoskops sofort mit **Cleanisept Wips** Einwegtuch **desinfizierend** abwischen

### 2. Schritt:

Das Endoskop mit **Reinigungslösung Bodedex forte 1 %** entweder durchsaugen oder mit einer 20 ml Spritze mehrmals durchspülen und auslaufen lassen

### 3. Schritt:

Dichtigkeitstest durchführen, laut Herstellerangaben (Druckhaltezeit 30 Sek.)!

Test bestanden                      Ja                       Nein

### 4. Schritt:

Endoskop im Endoskopcontainer transportieren

### 5. Schritt:

Flexibles Endoskop, Zubehörteile zusammen mit dem Anwenderformular sofort in die unreine Seite der ZSVA bringen lassen

## Dokumentation der ordnungsgemäßen Durchführung:

\_\_\_\_\_  
Unterschrift (leserlich) des Durchführenden

\_\_\_\_\_  
Aufbereitungsdatum